



Вспомогательная ступенька 10222

Вспомогательная ступенька с ручкой 10222Н



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3
1.1 Назначение	3
1.2 Технические характеристики	3
1.3 Упаковка	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	4
2.1 Важные предупреждения	4
2.2 Порядок работы	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	5

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик вспомогательной ступеньки 10222 и вспомогательной ступеньки с ручкой 10222Н.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Данные изделия предназначены для использования в качестве вспомогательной ступеньки. Вспомогательная ручка служит для поддержания равновесия.

1.2 Технические характеристики

Характеристики	10222	10222Н
материал	Хромированная сталь, резина	Хромированная сталь, резина
высота (см)	23	85
ширина (см)	35	35
глубина (см)	28	28
вес изделия (кг)	2,7	3

1.3 Упаковка

Комплектация 10222:

Двухсторонняя ножка – 2 шт.
Поверхность ступеньки – 1 шт.
Винт барашковый – 5 шт.

Комплектация 10222Н:

Двухсторонняя ножка – 2 шт.
Поверхность ступеньки – 1 шт.
Винт барашковый – 5 шт.
Винт барашковый большой – 4 шт.
Ручка для ступеньки – 1 шт.
Трубка для соединения ручки с поверхностью ступеньки – 2 шт.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Перед началом эксплуатации, пожалуйста, проверьте все части на наличие трещин.
- Ни в коем случае не облакачивайтесь всем весом на ручку.
- Это может привести к опрокидыванию и серьезным повреждениям.
- Максимальная нагрузка: 120 кг.

2.2 Порядок работы

Прежде чем приступить к использованию необходимо произвести сборку:

Для 10222

- Переверните и положите поверхность вспомогательной ступеньки на ровную и чистую поверхность.
- После чего совместите две двухсторонние ножки над данной ступенькой, так чтобы совпали центральные части и отверстия на поверхности ступеньки и ножках.
- Вкрутите винт барашковый в отверстия на ножках.

Для 10222Н

- Переверните и положите поверхность вспомогательной ступеньки на ровную и чистую поверхность.
- После чего совместите две двухсторонние ножки над данной ступенькой (проследите, чтобы отверстия на ножках для вкручивания ручки были с одной стороны), так чтобы совпали центральные части и совпали отверстия на поверхности ступеньки и ножках.
- Вкрутите винт барашковый в отверстия на ножках.
- Поставьте ступеньку на ножки.
- После чего поочередно совместите трубку для соединения со ступенькой, так чтобы отверстия на трубке совпали с отверстиями на ножке, далее вкрутите винт барашковый большего размера, чтобы трубка была неподвижна.
- Повторите действия из предыдущего пункта со второй трубкой.
- На трубки наденьте ручку до момента появления кнопки.

3. Техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить водой и не абразивными чистящими средствами.

Во избежание возникновения коррозии, тщательно высушите обработанную поверхность.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Вспомогательная ступенька 10222

Вспомогательная ступенька с ручкой 10222Н

Производитель: Valentine International LTD, Тайвань (Китай), 8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

CEC