



Поручни для ванны

Руководство по эксплуатации моделей:
10400, 10401, 10402, 10403, 10404,
10405



СОДЕРЖАНИЕ

1.ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	4
4.УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик поручней для ванны моделей: 10400; 10401; 10402; 10403; 10404; 10405.

Перед использованием проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Поручни для ванны являются страховочным элементом при перемещении людей с нарушенной координацией движений.

1.2 Технические характеристики

Модель 10400

- Поручень для ванн с универсальным креплением.
- Материал: ударопрочный, гигиенический пластик.
- Двойная эргономичная ручка.
- Крепление на борт ванны при помощи зажимов-фиксаторов.
- Регулируемая ширина крепления для различной ширины ванн 6,5 - 15,5 см.
- Регулировка ширины крепления с помощью барашкового зажима.
- Противоскользящее покрытие на внутренних стенках зажимов-фиксаторов.
- Вес: 1,8 кг.
- Максимальная нагрузка: 100 кг.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.

Модели: 10401, 10402, 10403, 10404, 10405

- Поручень настенный для ванн.
- Материал: ударопрочный, гигиенический пластик.
- Крепление с помощью 3-х шурупов с каждой стороны.
- Крепёжная часть диаметром 85 мм.
- Декоративная накладка на крепёжную часть.

- Расстояние от трубки до стены: 5 см.
- Длина: 10401 - 31 см; 10402 - 41 см; 10403 - 48 см; 10404 - 61 см; 10405 - 81 см.
- Максимальная нагрузка: 115 кг.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.

1.3 Упаковка

В комплект к моделям:

- 10400 входят: поручень для ванны, барашковый зажим;
- 10401, 10402, 10403, 10404, 10405 входят: декоративная панель на крепления, шурупы размером 5x35 мм.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие с мягким моющим средством и водой, затем тщательно высушите.
- Убедитесь, что все детали надежно закреплены.

2.2 Порядок работы.

Перед использованием проверьте элементы изделия на наличие дефектов и повреждений.

Модель 10400: установите поручень для ванны на борт ванны и зафиксируйте, закрутив барашковый фиксатор.

Модели: 10401; 10402; 10403; 10404; 10405: проделайте дырки в стене, в том месте, где будет закреплен поручень. Закрепите шурупами. Убедитесь, что используете дюбели, которые подходят именно для вашего типа стен. Дюбели в комплект не входят и подбираются в зависимости от материала стены, на которой будет прикреплен

3. Техническое обслуживание

После вскрытия упаковки проверьте изделие на наличие повреждений. В случае их обнаружения обратитесь к продавцу или дилеру данного изделия.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес сервисного и гарантийного центра, уполномоченного на ремонт и замену комплектующих, указан на сайте sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати,
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Поручни для ванны, модели: 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10405.

Произведено: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),
8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien,
R.O.C Поставщик: ООО «СИМС-2» (Россия)

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком.
с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца

М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

* Более подробная информация на сайте www.sims2.ru