



Стул для ванн Barry Largo



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ	5
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
5 .УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	6

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик стула для ванн Barry Largo.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Стул для ванн является изделием, предназначенными для людей с нарушенной координацией движения, для более удобного и безопасного принятия водных процедуры.

1.2 Технические характеристики

Для получения более подробных характеристик стоит обратиться к сайту: sims2.ru

- Алюминиевый каркас с порошковым напылением, устойчив к коррозии.
- Возможность установки в различные по ширине ванны.
- Сиденье изготовлено из гигиенического, ударопрочного пластика.
- Сиденье и спинка имеют отверстия для отвода воды.
- Регулируемая высота сиденья.
- Одна пара ножек надежно стоит на полу, а вторая — на дне ванны.
- Противоскользящие ножки.
- Широкое сиденье для удобной пересадки в ванну или душевую.
- Съёмная спинка с возможностью перестановки для пересадки.
- Съёмный поручень.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.

1.3 Упаковка

В комплектации: сиденье, ножки, спинка, руководство по эксплуатации.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:


- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все ножки надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на изделие не должна превышать 130 кг.

2.2 Порядок работы:


1. Поставьте ножки изделия на пол ровно. Убедитесь, что отверстия на ножках находятся на одинаковом уровне.
2. Зафиксируйте ручки стула винтами.
3. Установите раму сиденья между ножками и зафиксируйте длинными винтами.
4. Повторите те же действия с другой стороной.
5. Прикрепите спинку к раме спинки с помощью длинного винта.
6. Поставьте изделие на стол для того, чтобы собрать сиденье. Затяните винты. Отверстия, находящиеся дальше всего от ножек сиденья должны быть затянуты короткими винтами.
7. Соедините раму спинки с рамой сиденья с помощью длинных винтов.

3. Инструкция по сборке


1. Установите четыре ножки (E) и закрепите их четырьмя С-образными фиксаторами (F).
2. Установите трубы для установки спинки сиденья (C).
3. Установите подлокотник (D) и спинку (B).

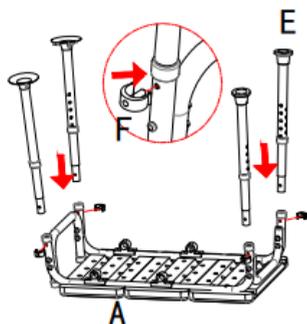

1.

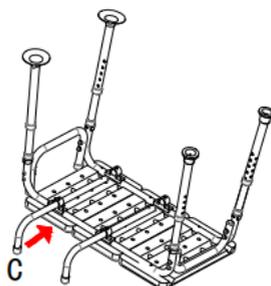

2.

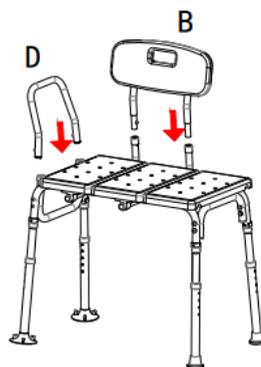

3.

Комплектация:

A: Сиденье - 1 штука.


B: Спинка - 1 штука.

C: Трубы для установки спинки сиденья - 2 штуки.

D: Подлокотник - 1 штука.

E: Ножки - 4 штуки.

F: Фиксаторы - 4 штуки.

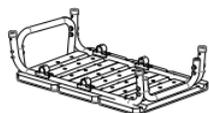

A



B



C



D



E



F

4. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

5. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Артикул № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Производитель: Valentine International LTD, Тайвань (Китай), 8-th Fl, №149, Sec 2,
Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C
Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Артикул №	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

**Более подробная информация на сайте www.sims2.ru