



Стул для ванны Барри Эма (**Barry Ella**)

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	3
2.1 Важные предупреждения.....	3
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	4

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик стула для ванны Барри Элла (Barry Ella). Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Стул для ванны Барри Элла (Barry Ella) с гигиеническим вырезом является полностью разборным. Ножки стула съемные, конструкция собирается с помощью гаек барашкового типа, на ножках установлены противоскользящие накладки.

1.2 Технические характеристики

материал	Алюминий с порошковым напылением
шаг регулировки высоты, см	2,5
регулировка по высоте, см	36-54
вес, кг	1,8
габариты сиденья, см	48x33
макс. нагрузка, кг	150

В комплектации: сиденье, ножки 4шт., противоскользящие насадки на ножки 4шт., каркасные балки 2 шт., шайбы 5 шт., барашковые гайки 5 шт., руководство по эксплуатации.

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягкими моющими средствами и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что рама и ножки надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на стул не должна превышать 150 кг.

2.2 Порядок работы

1. Достаньте все детали.
 2. Совместите две каркасные балки, закрепите на них сиденье с помощью барашковых гаек
 3. Присоедините противоскользящие насадки к ножкам
- Присоедините ножки к раме изделия и отрегулируйте высоту.

3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес сервисного и гарантийного центра, уполномоченного на ремонт и замену оборудования, указан на сайте sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.



Стул для ванны Барри Элла (Barry Ella)

Произведено: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),

8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C

Поставщик: ООО «СИМС-2» (Россия)

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.
