



## КРЕСЛА-КАТАЛКИ



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## Содержание

Введение .....	3
Ответственность .....	3
Условия использования .....	4
Применение и показания .....	4
Противопоказания .....	5
Меры предосторожности при использовании .....	6
Технические характеристики .....	7-10
Техническое обслуживание, уход за изделием и дезинфекция .....	11
Транспортировка, хранение и утилизация .....	12
Условия гарантии .....	13

Уважаемый клиент,

Благодарим ваш выбор и приобретение кресла-каталки Barry. Данное кресло-коляска обеспечит вам комфортное и безопасное передвижение. Мы гарантируем высокое качество выбранного вами изделия, сочетающего в себе современную функциональность и надежность. Перед использованием кресла-каталки обязательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. В нем содержится вся информация о функциях, необходимых для ежедневного применения кресел-каталок Barry. Желаем вам комфортной и безопасной эксплуатации изделия.

## Ответственность

Изготовитель рекомендует использовать изделие и осуществлять уход за ним в соответствии с его руководством по эксплуатации.

Изготовитель несет ответственность по гарантийным обязательствам только в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним.

Изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, полученные в результате его неправильного использования, проведения ремонтных работ не в специализированных сервисных центрах или применения в изделии запасных частей и компонентов, не предусмотренных изготовителем. Работы по ремонту и гарантийному обслуживанию изделия могут выполняться только в специализированных мастерских или непосредственно изготовителем.

### Назначение

Кресла-каталки Barry предназначены для передвижения людей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата.

Кресла-каталки Barry пригодны только для использования в помещениях на твердых и ровных поверхностях.

Кресла-каталки Barry пригодны для многократного применения. При использовании другим пациентом кресло-каталку необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию его состояния.

### Описание принципов работы

Кресла-каталки Barry приводятся в движение вручную и служат исключительно для передвижения пациента с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающего его лица.

Пользоваться креслами-каталками Barry без посторонней помощи разрешается только тем лицам, которые в силу своих физических и умственных способностей в состоянии правильно их эксплуатировать (приводить в движение, управлять, тормозить). Кресла-каталки Barry должны соответствовать вашему состоянию здоровья.

## Применение и показания

Кресло-каталка используется пациентами для перемещения в лечебном учреждении, дома или в других помещениях.

Кресла-каталки могут также использоваться при следующих заболеваниях:

- Манингомиелит
- Прогрессирующая мышечная дистрофия
- Детский церебральный паралич
- Множественный склероз

- Гемиплегия центральной части тела
- Посттравматические повреждения мозга
- Деформации конечностей средней тяжести
- Дистемия
- Фокомелия
- Выраженный остеогенез
- Судороги, незначительные повреждения суставов
- Полиартрозы
- Полиартриты, болезнь Бехтерева

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

## Меры предосторожности при использовании

- Не пытайтесь дотянуться до какого-либо предмета, если вам для этого необходимо передвинуться на сидении вперед.
- Не пытайтесь поднимать предметы с пола, наклоняясь между коленями.
  - Не наклоняйтесь над верхним краем спинки, чтобы достать до предметов, находящихся позади вас: это может привести к опрокидыванию коляски.
  - Всегда устанавливайте одновременно оба стояночных тормоза.
  - Стояночные тормоза используются только после остановки коляски: ни в коем случае не применяйте их для снижения скорости коляски или в качестве опоры при пересадке.
  - Не рекомендуется преодолевать лестничные пролеты и высокие препятствия без посторонней помощи.
  - При преодолении повседневных препятствий (ступенек, порогов) нужно расположить задние колеса коляски по направлению движения.
  - Сопровождающим лицам не следует поднимать коляску, держась за съемные части.
  - При подъеме или спуске по наклонным поверхностям сопровождающему лицу следует придерживать коляску за ручки.
    - Не оставляйте коляску на наклонных поверхностях.
    - При посадке или высадке в/из кресла-каталки Barгу следует поставить задние (приводные) колеса на стояночные тормоза.
    - При начале использования коляски избегайте резких движений и толчков. Это может привести к опрокидыванию.
    - Во избежание травм берегите пальцы от подвижных деталей.

## Технические характеристики

		V1	V1AL	V2	V2XL	V2R	V2P	V4	V4AL
Тип рамы	алюминиевая		+						+
	стальная	+		+	+	+	+	+	
Ширина общая, мм		600	570	590	720	600	590	580	610
Тип подножек	с упором для голени				+				
	съёмные	+	+	+	+	+	+	+	+
	откидные	+	+	+	+	+	+	+	+
Тип подлокотников	фиксирован.		+					+	+
	съёмные	+							
	откидные			+	+	+	+		
Высота общая, мм		900	900	900	890	900	910	960	970
Длина общая, мм		900	950	910	920	950	900	930	970
Ширина в сложен. вид, мм		250	260	-	-	-	-	300	270

Высота спинки, мм	400	440	400	380	380	390	430	490
Ширина спинки, мм	460	460	460	570	500	440	410	430
Откидная спинка	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Ширина сиденья, мм	460	460	460	510	460	440	410	410
Глубина сиденья, мм	400	400	440	440	440	430	400	410
Высота от пола до сиденья, мм	490	450	520	490	490	530	500	490
Диаметр задних колес, мм	300	300	120	130	120	120	200	200
Диаметр передних колес, мм	200	150	120	130	120	120	200	200
Масса изделия, кг	13,9	9,6	12,3	13,9	12	11,8	11	9
Макс. нагрузка, кг	120	100	120	120	100	120	100	120
Тормоза для сопровождающего лица	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Абдуктор	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Санитарное устройство	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

		6AL	V7	7AL	8AL	CP1	CP2	CP3
Тип рамы	алюминиевая	+		+	+	+	+	+
	сталь		+					
Ширина общая, мм		620	630	580	540	590	580	500
Тип подножек	с рег. угла наклона	+				+	+	
	съёмные		+			+	+	
	откидные	+	+		+	+	+	
	фиксирован.			+				+
	с регулир. по высоте							+
Тип подлокотников	фиксирован.			+				
	съёмные		+				+	+
	откидные	+			+	+		
	с регулир. по высоте						+	+
Высота общая, мм		910	900	880	940	1020	950	920-1060
Длина общая, мм		910	940	880	900	1020	980	930
Ширина в сложен. вид, мм		260	310	280	280	380	360	290

Высота спинки, мм	420	390	430	400	440	440	410
Ширина спинки, мм	480	440	460	410	380/ 460	380/ 460	380/ 440
Откидная спинка	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
Ширина сиденья, мм	480	440	460	410	380/ 460	380/ 460	380/ 440
Глубина сиденья, мм	360	400	360	400	410	390	360
Высота от пола до сиденья, мм	470	500	480	470	510	510	530
Диаметр задних колес, мм	300	200	380	200	375	400	400
Диаметр передних колес, мм	150	200	150	150	150	150	150
Масса изделия, кг	10	13,3	11,9	8,7	20,5	21,4	17,5
Макс. нагрузка, кг	120	120	120	100	120	120	120
Тормоза для сопровождающего лица	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
Абдуктор	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
Санитарное устройство	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

### Техническое обслуживание

Работоспособность кресел-каталок должна проверяться каждый раз до их применения. При обнаружении неисправностей просьба незамедлительно обратиться в специализированный сервис с целью их устранения. Особенно, это касается случаев, когда изменяются ходовые качества Изделий или снижается их устойчивость.

Необходимо периодически самостоятельно смазывать машинным маслом механизм складывания, подвижные и съемные части коляски.

Техническое обслуживание и ремонт кресел-каталок Barry, включая гарантийный ремонт, производится на территории РФ уполномоченным дистрибьютором производителя - ООО «СИМС-2».

Адрес гарантийной мастерской уточняйте на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

### Уход за изделием и дезинфекция

Чтобы максимально продлить срок службы кресел-каталок Barry, следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Очистите металлические элементы влажной мягкой салфеткой. При этом может использоваться мягкое чистящее средство.
- При загрязнении кресел-каталок, по возможности, немедленно сотрите влажную грязь и просушите тряпкой элементы кресла-каталки.
- При уходе за креслами-каталками Barry не рекомендуется использовать спиртосодержащие, абразивные чистящие средства и средства с красителями, а также проводить обработку с помощью жестких щеток.
- Перед использованием другим пациентом кресел-каталок необходимо протереть или продезинфицировать.

Кресла-каталки Barry можно транспортировать любыми видами транспорта с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков.

Упакованные кресла-каталки Barry должны храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

### **Срок службы**

Кресла-коляски Barry рассчитаны на 5 лет безотказной службы при условии регулярного технического обслуживания согласно Руководству по эксплуатации, прилагаемому к каждому изделию.

### **Утилизация**

По истечении срока службы или порче кресла-коляски Barry, исключающих возможность ремонта, необходимо провести дезинфекцию Изделия и его утилизацию, согласно нормам СанПин 2.1.7.2790-10 и статье 23 Федерального закона «Об обращении медицинских изделий». В случае утилизации кресел-каталок Barry пластиковые и металлические части должны быть отделены друг от друга.

## Условия гарантии

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа Изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.

При обнаружении брака или несоответствия Изделия, претензии принимаются уполномоченным дистрибьютором производителя в РФ - ООО «СИМС-2» по адресу:

### **Адрес для отправки Почтой России:**

125430, г. Москва, ул. Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18, получатель ООО «СИМС-2».

Артикул № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

место печати, штамп (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное Изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Производитель: Фошань Дахао Медикал Технолоджис Ко. Лтд, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10,

пом.1012Б, ком. с 15 по 18 Тел./факс : (495) 792-31-90, (800)

200-31-90;

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2025/25066 от 31 марта 2025 года

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.  
Фирма-производитель также не несет ответственность за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

Последняя редакция 29.08.2025 г.

